

## Bruksanvisning

Lyftduk XL är avsedd för lyft och överflyttning av brukare i horisontellt läge. Den är endast avsedd att användas i kombination med Planlyft Flexo™-tillbehöret, art.nr 3156057, och Planlyft Ultra™-tillbehöret, art.nr 3156058. Lyftduk XL finns i två varianter, regular och tall. Maxlast 400 kg.

### VIKTIGT!

Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Läs bruksanvisningen för både patientlyften och Planlyft Flexo-tillbehöret eller Planlyft Ultra-tillbehöret före användning. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Utrustningen får endast användas av utbildad personal. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

## Symbolbeskrivning

Dessa symboler finns i det här dokumentet och/eller på produkten.

Symbol	Beskrivning
	Varning! Den här situationen kräver extra försiktighet och uppmärksamhet.
	CE-märkning
	Juridisk tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Läs bruksanvisningen före användning
	Produktidentifikation
	Serienummer
	Medicinteknisk produkt
	Ej kemtvätt
	Ej strykning
	Ej torktumling
	Tvätt Symbolen förekommer alltid i kombination med rekommenderad temperatur i °C och °F.
	Latexfri
	Ej blekning
	Periodisk inspektion
	Riktning uppåt och symbol på produktens utsida.
	Symbol på produktens utsida.
	GS1-datamattisreckkod som kan innehålla följande information. (01) GTIN-artikelnummer (11) Produktionsdatum (21) Serienummer

Medicinteknisk produkt klass I

# Säkerhetsföreskrifter

## Produktändringar

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta en representant för Hill-Rom för att få information, råd och eventuella uppdateringar.

## Design and Quality by Liko in Sweden

Hanteringssystemet för både tillverkning och utveckling av produkten är certifierat i enlighet med ISO9001 och dess motsvarighet för den medicintekniska branschen, ISO13485. Hanteringssystemet är även certifierat i enlighet med miljöstandarden ISO14001.

## Meddelande till användare och brukare i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller brukaren befinner sig.

## Tillsyn och skötsel

Kontrollera produkten före varje användning. Kontrollera att följande inte uppvisar tecken på slitage och skador:

- tyg
- sömmar
- upphängningsöglor.

**⚠ Använd inte trasiga lyfttillbehör.**

Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

## Tvättinstruktioner

Se produktetiketten på lyfttillbehöret samt den bifogade bilagan "Skötselråd för Likos lyftselar".

## Periodisk inspektion

Produkten måste inspekteras minst en gång var sjätte månad. Mer frekventa inspektioner kan krävas om produkten används eller tvättas oftare än normalt. Kontakta en representant för Hill-Rom för information om protokoll.

## Förväntad livslängd

Produkten har en förväntad livslängd på 5 år. Den förväntade livslängden baseras på 10 användningar per dag och tvättning en gång i veckan, enligt tvättanvisningarna. Hill-Rom rekommenderar att produkten endast används under sin förväntade livslängd.

## Återvinningsinstruktioner


Hela lyftduken ska sorteras som brännbart avfall.

Hill-Rom gör utvärderingar och vägleder användarna om säker hantering och kassering av produkter för att förebygga skador, inklusive, men inte begränsat till: skärsår, sticksår, skrubbsår och eventuell rengöring och desinficering av den medicintekniska produkten efter användning och före kassering. Kunderna bör följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör.

Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hill-Roms tekniska support för råd om säker kassering.

## Översikt över Liko™ Lyftduk XL

Benämning	Art.nr	Material	Längd (a)	Maxbelastning
Lyftduk XL, regular	3684105	Polyester	165 cm	400 kg
Lyftduk XL, tall	3684106	Polyester	185 cm	400 kg

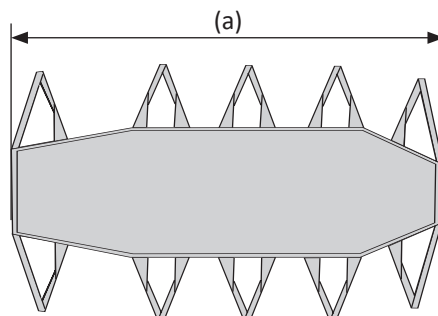

[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sverige  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

**Hill-Rom**