

Produktbeskrivning

Stussbandet är ett tillbehör som placeras under stussen på brukaren och hjälper till under den första delen av uppresningen. Det passar brukare som behöver hjälp att få upp stussen vid uppresningen. Detta förebygger att uppresningsvästen glider upp, vilket kan ge oönskat tryck under armarna.

Sabina Stussband är endast utformat för användning med Liko Sabina™ uppresningslyftar. Stussbandet används alltid tillsammans med en av Likos uppresningsvästar. Dessutom måste lyften kompletteras med Sabina Stussbandsbygel.

Den medföljande plastskivan är avsedd att underlätta appliceringen av stussbandet. Plastskivan skjuts in i tygfickan på stussbandets undersida och gör att det blir lättare att få in stussbandet under stussen på brukaren.




















I texten kallas den som blir lyft för brukaren och den som hjälper för medhjälparen.

VIKTIGT!

Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Studera därför noga bruksanvisning för såväl lyft som lyfttillbehör. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Utrustningen får endast användas av utbildad personal. Förvissa dig om att lyfttillbehöret passar till den lyft som används. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara lyftsituationen. Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

Symbolbeskrivning

Dessa symboler finns i det här dokumentet och/eller på produkten.

Symbol	Beskrivning
	Varning! Den här situationen kräver extra försiktighet och uppmärksamhet.
	Läs bruksanvisningen före användning
	CE-märkning
	Juridisk tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Produktidentifikation
	Serienummer
	Medicinteknisk produkt
	Ej kemtvätt
	Ej strykning
	Torktumling
	Ej torktumling
	Tvätt Symbolen förekommer alltid i kombination med rekommenderad temperatur i °C och °F.
	Latexfri
	Periodisk inspektion
	Ej blekning
	Torkning på lina i skugga
	Riktning uppåt och symbol på produktens utsida.
	Symbol på produktens utsida.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAAMMD (21) 012345678910</small>	GS1-datamatrixstreckkod som kan innehålla följande information. (01) GTIN-artikelnnummer (11) Produktionsdatum (21) Serienummer

Säkerhetsföreskrifter

Tänk på följande innan du lyfter:

- Om det behövs en eller flera medhjälpare får bedömas från fall till fall av ansvarig person i er verksamhet.
- Planera lyftet så att det sker så säkert och smidigt som möjligt.
- Trots att Likos lyftbyglar är försedda med urkrokningsskydd måste särskild uppmärksamhet iakttas. Innan brukaren lyfts från underlaget, men när banden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är korrekt kopplade på lyftbygelns krokar.
- Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en lyftsituation.
- Se till att hjulen på rullstol, säng, brits osv. är låsta under arbetsmomenten.
- Arbeta alltid ergonomiskt. Nyttja brukarens förmåga att aktivt vara delaktig vid arbetsmomenten.

 Medicinteknisk produkt klass I

Produktändringar

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta en representant för Hill-Rom för att få information, råd och eventuella uppdateringar.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och motsvarigheten ISO 13485 för medicintekniska företag. Liko är också certifierat i enlighet med miljöstandarden ISO 14001.

Meddelande till användare och brukare i EU

Alla allvarliga incidenter som har inträffat i relation till produkten ska rapporteras till tillverkaren och berörd myndighet i medlemsstaten där användaren och/eller brukaren befinner sig.

Tillsyn och skötsel

Kontrollera lyftselen före varje användning. Kontrollera att följande inte uppvisar tecken på slitage och skador:

- tyg
- band
- sömmar
- upphängningsöglor.

Använd inte skadade lyfttillbehör.

Kontakta tillverkaren eller leverantören om något är oklart.

Tvättinstruktioner: Se stussbandets produktetikett och bifogad bilaga "Skötselråd för Likos lyftselar"

Ta bort plastskivan före tvätt (se sidan 4). Plastskivan ska rengöras med desinfektionsmedel.

Periodisk inspektion

Produkten måste inspekteras minst en gång var sjätte månad. Mer frekventa inspektioner kan krävas om produkterna används eller tvättas oftare än normalt. Kontakta en representant för Hill-Rom för information om protokoll.

Förväntad livslängd

Produkten har en förväntad livslängd på 1–5 år. Den förväntade livslängden baseras på tio användningar per dag och tvättning en gång i veckan, enligt tvättanvisningarna. Hill-Rom rekommenderar att produkten endast används under sin förväntade livslängd.


Återvinningsinstruktioner

Stussbandet ska sorteras som brännbart avfall.

Hill-Rom gör utvärderingar och vägleder användarna om säker hantering och kassering av produkter för att förebygga skador, inklusive, men inte begränsat till: skärsår, sticksår, skrubbsår och eventuell rengöring och desinficering av den medicintekniska produkten efter användning och före kassering. Kunderna bör följa alla federala, statliga, regionala och/eller lokala lagar och förordningar som gäller säker kassering av medicinsk utrustning och tillbehör.

Vid tveksamhet ska användaren av enheten i första hand kontakta Hill-Roms tekniska support för råd om säker kassering.

Applicering

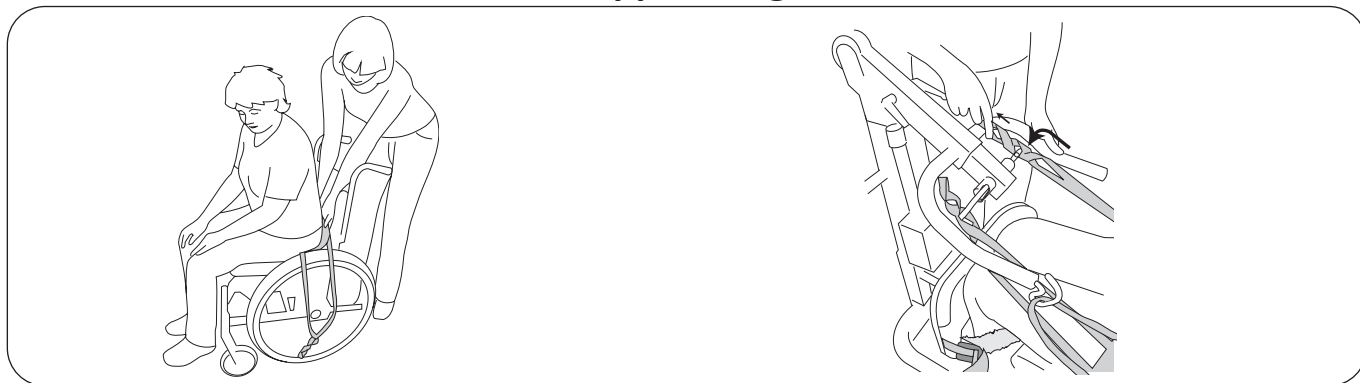


Sänk stussbandet så långt ned som möjligt under stussen.

Tips: Plastskivan underlättar appliceringen.

Applicera uppreningsvästen. Kör fram Sabina Uppreningslyft. Koppla västens bandöglor på lyftbygeln. För utförligare instruktioner, se bruksanvisningen för den väst och lyft som används.

Sträck banden på Stussbandet och koppla på lämpliga bandöglor på Stussbandsbygeln.


Uppresning

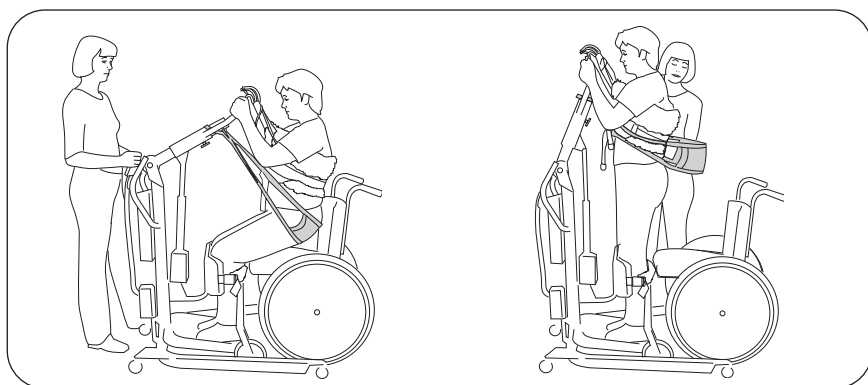

Påbörja uppresningen. Stussbandet hjälper till under den första delen av uppresningen.

I upprest läge förlorar stussbandet sin belastning och kan enkelt föras åt sidan för att underlätta vid exempelvis toalettbesök.

Åter till sittande

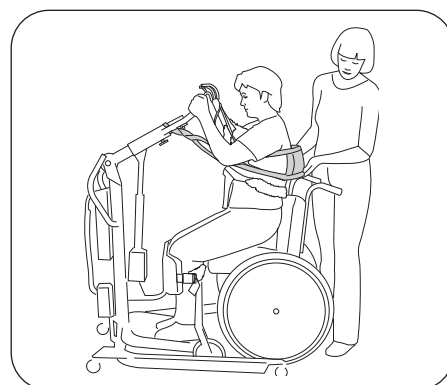


Under nedsänkningen kommer brukaren lättare i rätt position i rullstolen om Stussbandet inte används.

Översikt Liko™ Sabina™ Stussband

Benämning	Art.nr	Material	Längd (tygdel)	Maxbelastning
Sabina Stussband	3591115	Polyester, plastad väv	50 cm	200 kg

Plastskiva

Till Stussbandet medföljer en plastskiva (polyeten) som är avsedd att underlätta appliceringen.

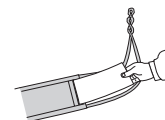

Kombinationer

Stussbandet är endast avsett för användning med Liko Sabina™ uppreningslyftar och Sabina Stussbandsbygeln.

Andra kombinationer av tillbehör/produkter än de av Liko rekommenderade kan medföra risk för brukarens säkerhet.



www.hillrom.com