


Welch Allyn

ABPM 7100

Omfattande blodtrycksövervakning
för bekväm patientvård i hemmet

WelchAllyn[®]

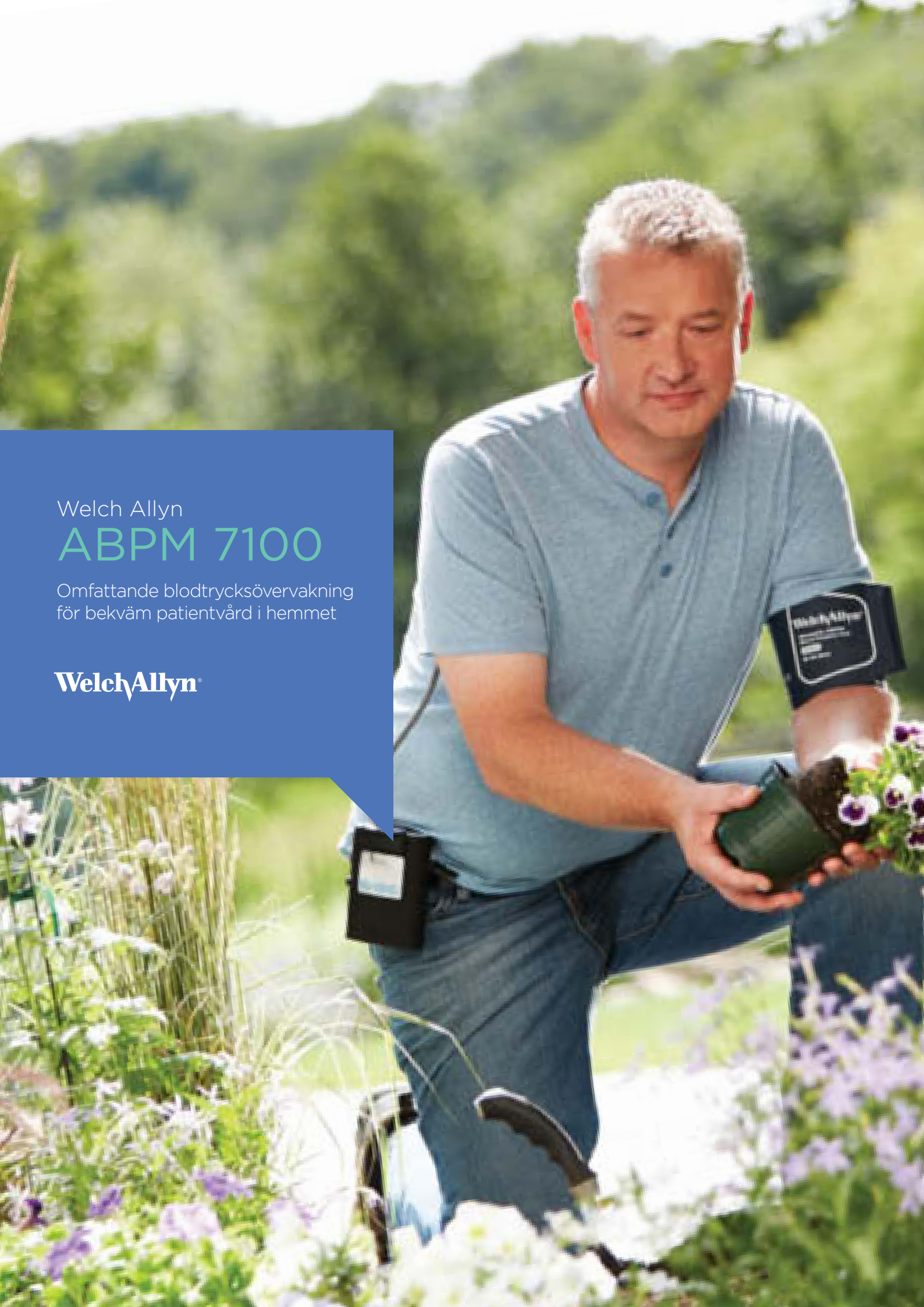



GER OMFATTANDE BLODTRYCKSANALYSER SÅ ATT BÄTTRE VÅRDBESLUT KAN FATTAS



Welch Allyn ABPM 7100 är en användarvänlig, bärbar enhet för dygnsövervakning av blodtryck. Den är utformad för att undvika effekterna av vitrockshypertoni, ge tillförlitliga data så att du kan göra noggranna sömnmätningar och anpassa läkemedelsbehandlingen efter patienternas behov. Enheten använder kraftfull Windows®-baserad programvara som hjälper dig att analysera blodtrycksavläsningarna effektivare så att du kan diagnostisera potentiella komplikationer hos patienterna. Med allt det här kan ABPM 7100 hjälpa dig att förbättra hanteringen av blodtryck för dina patienter och göra övervakningen effektiv på din mottagning.



FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

- Med obegränsade protokoll kan du programmera mättningsperioder och uppblåsningsfrekvenser utifrån de värden som ska studeras
- Använder oscillometrisk teknik, den främsta metoden för automatisk mätning av NIBP
- AFL (Auto Feedback Logic) under uppblåsningen gör att patienten slipper känna obehag
- Lätt, kompakt och tyst för att öka patientföljsamheten
- Manschetterna är inte gjorda av latex. Risken för allergiska reaktioner hos patienten är därmed mindre.
- Följer eller överskrider de senaste AAMI- och EHS-standarderna och har fått BHS-betyget A/A
- Innehåller programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation
- Uppgradera för att lägga till ytterligare funktioner, däribland mätning av centralt blodtryck och pulsvågsanalys (artärstelhet)

Uppgradering finns: Pulsvågsanalys och centralt blodtryck

Studier visar att mätning av puls vågshastigheten i aorta och det centrala blodtrycket kan ge tydligare information om en potentiell hjärtinfarkt och stroke än den blodtrycksmätning som endast görs på överarmen. Med Welch Allyn ABPM 7100 med puls vågsanalys och central blodtrycksmätning kan båda mätningmetoder användas i en enda enhet, så att du kan få exaktare mätresultat och enklare kan upptäcka kardiovaskulära risker och subkliniska organskador.

Mätning av blodtryck och puls vågor, kombinerat i en procedur. Omklassificering av riskpatienter. I.E.M. GmbH, 52222 Stolberg, Tyskland.

Med resultaten från Welch Allyn ABPM 7100 kan du enkelt skapa, skriva ut och anpassa detaljerade rapporter efter behov:



Programvara till
Welch Allyn
CardioPerfect
Workstation



1. Statistiska sammanfattningar för systoliskt tryck, pulstryck, medelartärtryck och hjärtfrekvens, inklusive lägsta värde, högsta värde, genomsnittsvärde och standardavvikelser




2. Grafiska presentationer av blodtrycksprofilen med bland annat tårtdiagram, stapeldiagram och korrelationsdiagram per dygn, samt enskild statistik för avläsning av dag och natt



3. Redigerbar tabellrapport för detaljerad analys



4. Trendverktyg för långsiktig utvärdering och medicinhantering

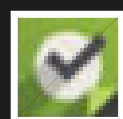

5. Sammanfattning


Programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation




Trender

Kraftfull programvara som gör datahanteringen enklare


Welch Allyn ABPM 7100 är en del av programvaruserien CardioPerfect Workstation. Programvaran hanterar data från ABPM 7100 och andra kardiopulmonära enheter från Welch Allyn på samma sätt, så att du kan lagra all patientinformation i samma register. Du slipper pappershantering och får överföringsmöjligheter. På så vis kan du hämta och analysera information snabbt och fokusera på att ta hand om patienterna. Om du sedan är redo för elektroniska journaler (EMR) kan patientinformation och testdata enkelt överföras till flera ledande elektroniska journalsystem i ett enkelt elektroniskt gränssnitt.

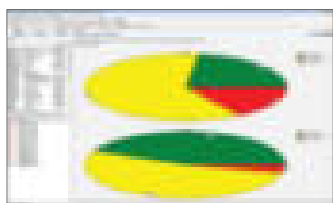


Utanför standarder

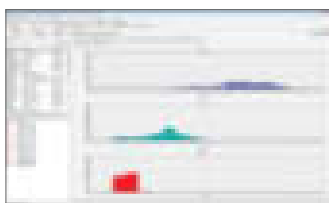

Frekvensfördelning

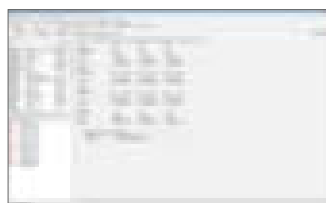

Sammanfattning

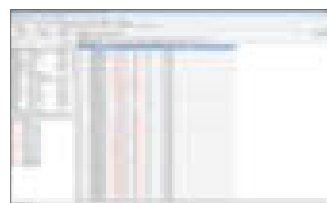

Mätning

BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Enheter

ABPM 7100
ABPM 7100S

ABPM 7100-inspelningsenhet
ABPM 7100-inspelningsenhet, inklusive programvara till Welch Allyn CardioPerfect® Workstation

Tillbehör

7100-21
7100-24
REUSE-09-ABPM
REUSE-10-ABPM
REUSE-11-ABPM
REUSE-11L-ABPM
REUSE-12-ABPM
REUSE-091012-ABPM
REUSE-ALL-ABPM

Väska och axelbälte för ABPM 7100
USB-gränssnittskabel för ABPM 7100
ABPM-manschett, barn: 14-20 cm
ABPM-manschett, liten vuxen: 20-24 cm
ABPM-manschett, vuxen: 24-32 cm
ABPM-manschett, stor vuxen: 32-38 cm
ABPM-manschett, extra large: 38-55 cm
Set med små manschetter (storlekarna 9, 10 och 12)
Set med alla fem manschettstorlekar

Om du vill ha mer information eller vill se en demonstration kontaktar du din lokala Welch Allyn-representant.

WelchAllyn®

Welch Allyn
Kundtjänst tel: +46 8 585 365 51

WWW.WELCHALLYN.SE