
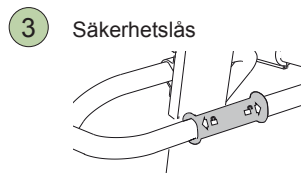


RollOn

Användaranvisning

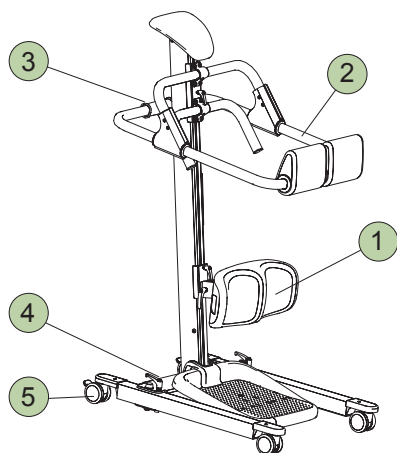

900002187 Rev.02 SV_FI

Säkerhetsföreskrifter

- Läs bruksanvisningen före användning.
- Se till att rätt inställningar har gjorts och att brukaren står säkert i uppresningsstödet innan förflyttning sker.
- Se till att samtliga låsvred är ordentligt fixerade innan förflyttning sker.
- Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara förflyttningssituationen med RollOn.


• Maxlast: 160 kg

Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en förflyttningssituation.


VIKTIGT!

Denna användaranvisning ersätter inte uppresningsstödet bruksanvisning, vilken kan laddas ner från www.liko.se.

1 Underbensstöd

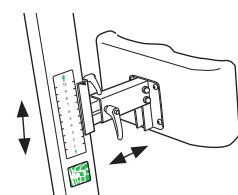


Inställning
Justering kan ske i höjd- och djupled.

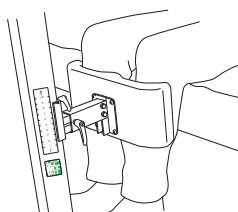


Utprovning
Justera höjden så att underbensstödet ger ett bekvämt mothåll strax under knäskålen. Vid behov kan även stödets djup justeras.


2 Stussram

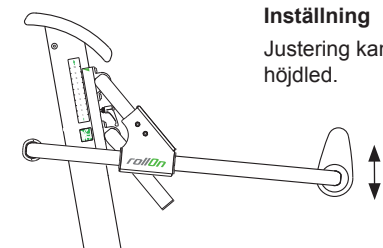


Inställning
Justering kan ske i höjddled.

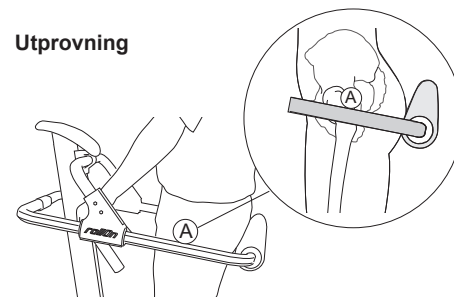

Utprovning


Ramen bör vara strax under brukarens höftkular/ höftleder  för att undvika att brukaren glider ner eller kan sitta på stusskuddarna.

3 Säkerhetslås

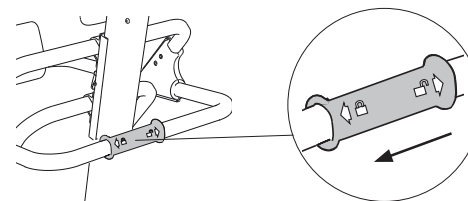


⚠ Säkerhetslåset ska vara stängt under förflyttning av brukare.

4 Underrede

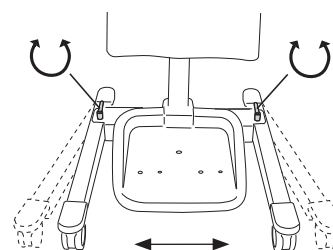

5 Låsning av hjul

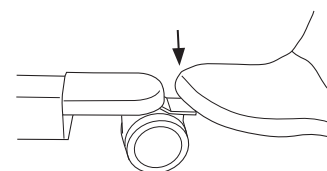

⚠ Lås hjulen under uppresning.

Användningsområden:

- mellan säng och stol/rullstol
- mellan stol/rullstol och toalett
- längre bak i stol/rullstol.

RollOn täcker in behovsområdet mellan konventionell rollator och uppresningslyft.

Problem vid användning

Om brukaren inte själv orkar genomföra uppresningsmomentet, rekommenderar vi att lyft används, i första hand Likos uppresningslyft Sabina.

Ergonomi

- Inga manuella lyft - låt brukaren och uppresningsstödet göra jobbet.
- Stressa inte - arbeta lugnt och metodiskt.
- Skona ryggen - arbeta i gångstående med rak rygg.
- Undvik vridmoment - rör fötterna.
- Minska hävarmarna - arbeta nära.

Rengöring

Vid behov, rengör lyften genom att torka av den med en trasa fuktad med varmt vatten.

 Läs bruksanvisningen för mer information.

Övriga användaranvisningar

Likos användaranvisningar finns att ladda ner från www.liko.se.

© Copyright Liko AB



A  Company



www.liko.se

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Tel: 0920 - 24 47 00
Fax: 0920 - 24 47 01
info@liko.se

7SV175501-02

RollOn

Pikakäyttöopas

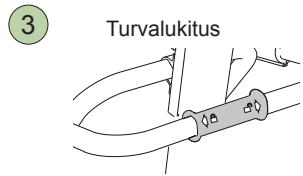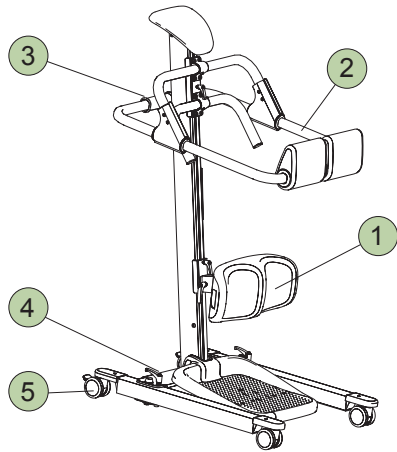

Turvaohjeet


- Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että säädöt on tehty oikein ja että avustettava seisoo tukevasti nousutuessa ennen kuin lähdet siirtämään häntä laitteessa.
- Varmista, että kaikki lukitukset on kunnolla kiinni ennen liikkeelle lähtemistä.
- Avustajana olet aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Ota selvää käyttäjän mahdollisuuksista selvitä siirrosta RollOnilla.
- **Maximikuorma: 160 kg**

Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa laitteeseen.


Tärkeää!

Tämä pikakäyttöopas ei korvaa täydellistä käyttöohjetta, jonka voi tulostaa likon kotisivulta osoitteesta www.liko.com.

1 Säätituki

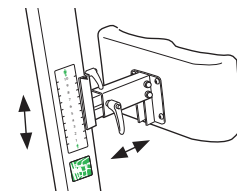


Säätäminen
Säätitukea voi säätää sekä korkeus- että syvyysuunnassa.

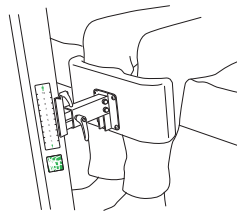


Sovittaminen
Varmista säätituen korkeus varmistamalla, että se antaa mukavan vasteen sääriin juuri polvilumpion alapuolella. Tarvittaessa säätituen syvyyttä voi myös säätää.

2 Tukikehys

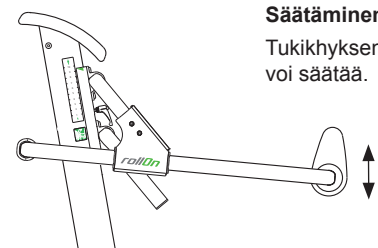


Säätäminen
Tukikehyksen korkeutta voi säätää.

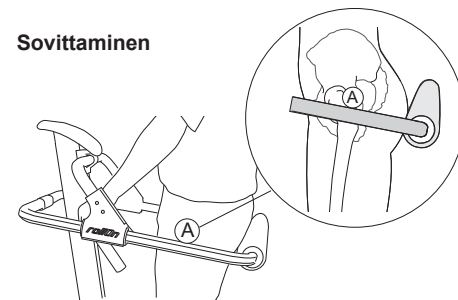

Sovittaminen


Tukikehys tulee olla juuri lonkkanivelen alapuolella (A), jolloin se estää avustettavaa liukumasta alas tai istumasta kehysten päällä.

3 Turvalukitus

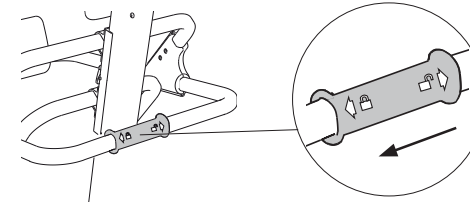


Turvalukko on oltava kiinni koko kuljetuksen ajan.

4 Alusta

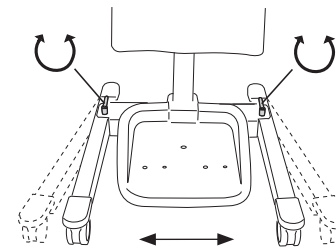

5 Pyörien lukitus

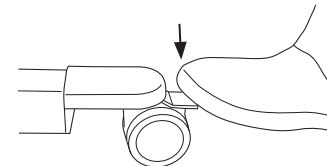

Lukitse pyörät, kun avustettava nousee laitteesta ylös.

Käyttöalueet:

- siirtyminen vuoteesta pyörätuoliin ja takaisin
- WC-siirtymisissä tuolista WC-istuimelle ja takaisin
- avustettaessa peremälle tuolissa.

RollOn sopii siirtymisiin, jotka mahtuvat rollaattorin käytön ja seisomaan nostavan nostolaitteen käytön väliin.

Ongelmia käytössä

Jos käyttäjä ei itse jaksaa suorittaa ylösnousumomenttia, suositeltavaa on käyttää Sabinaa – seisomaan nostavaa nostolaitetta.

Ergonomia

- Ei manuaalisia nostoja – annan avustettavan itse yrittää ja RollOnin tehdä loput.
- Älä painosta – työskentele rauhallisesti ja järjestelmällisesti.
- Vaali selkääsi – työskentele käyntiasennossa ja selkä mahdollisimman suorana.
- Vältä vääntömomenttia – liikuta jalkoja.
- Vähennä vipuvartta – työskentele mahdollisimman lähellä.

Puhdistaminen

Puhdista RollOn tarvittaessa lämpimään veteen kostutetulla liinalla.

 Lue käyttöohjeesta lisää.

Muita pikakäyttöoppaita

Likon pikakäyttöoppaat on tulostettavissa Likon kotisivulta www.liko.com.

© Copyright Liko AB



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Vamistaja:

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se