


## Produktbeskrivning

Stussbandet är ett tillbehör som placeras under stussen på brukaren och hjälper till under den första delen av uppresningen. Det passar brukare som behöver hjälp att få upp stussen vid uppresningen. Detta förebygger att uppresningsvästen glider upp vilket kan ge oönskat tryck under armarna.

Sabina Stussband är endast avsedd för användning tillsammans med Liko Sabina uppresningslyftar (olika modeller finns). Stussbandet används alltid tillsammans med någon av Likos uppresningsvästar. Dessutom krävs att uppresningslyften är kompletterad med Sabina Stussbandsbygel.

Den medföljande plastskivan är avsedd till att underlätta appliceringen av Stussbandet. Plastskivan skjuts in i tygfickan på Stussbandets undersida och gör att det blir lättare att få in Stussbandet under stussen på brukaren.


 **Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk. Studera därför noga bruksanvisningen för Sabina uppresningslyft och för den uppresningsväst som används. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen. Endast den personal som är informerad bör använda utrustningen. Förvissa dig om att lyfttillbehöret passar till den lyft som används. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet. Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara lyftsituationen. Kontakta tillverkaren/leverantören vid oklarheter eller om frågor uppstår. Bruksanvisningar kan laddas ner kostnadsfritt från [www.liko.se](http://www.liko.se).**

*I texten kallas den som blir lyft för brukaren och den som hjälper för medhjälparen.*

### Att tänka på!

- Om det behövs en eller flera medhjälpare får bedömas från fall till fall av ansvarig person i er verksamhet.
- Planera lyftmomentet, före lyft, så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt.
- Trots att Likos lyftbyglar är försedda med urkrokningskydd måste särskild uppmärksamhet iakttagas: Innan brukaren lyfts från underlaget, men när banden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är korrekt kopplade på bygeln.
- Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en lyftsituation.
- Se till att hjulen på rullstol, säng, brits etc är låsta under arbetsmomenten.
- Arbeta alltid ergonomiskt.

## Applicering

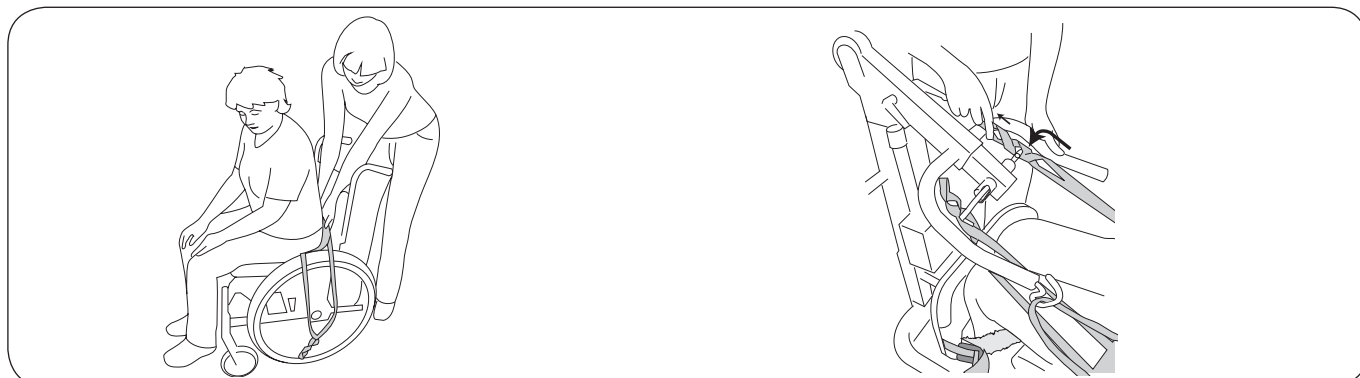


För ned Stussbandet så långt ner under stussen som möjligt.  
**Tips!** Plastskivan underlättar appliceringen.

Applicera uppresningsvästen. Kör fram Sabina-lyften. Koppla västens bandöglor på lyftbygeln. För utförligare instruktioner, se bruksanvisningarna för den väst och lyft som används. Sträck banden på Stussbandet och koppla på lämpliga bandöglor på Stussbandsbygeln.




## Uppresning

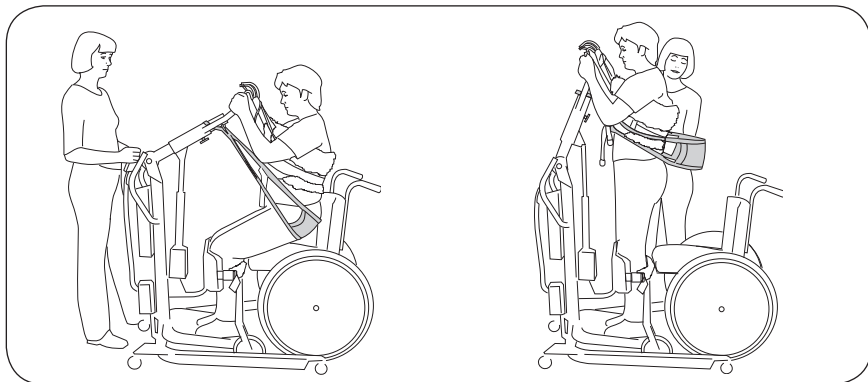

Påbörja uppresningen. Stussbandet hjälper till under den första delen av uppresningen.

I upprest läge förlorar Stussbandet sin belastning och kan enkelt föras åt sidan för att underlätta vid exempelvis toalettbesök.

## Åter till sittande

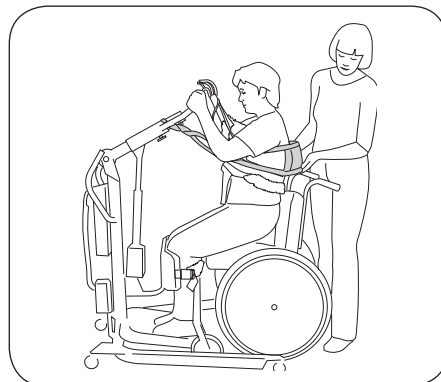


Under nedsänkningen kommer brukaren lättare i rätt position i rullstolen om Stussbandet inte används.

## Översikt Sabina Stussband

Benämning	Art. nr	Material	Maxlast
Sabina Stussband	3591115	Polyester, plastad väv	200 kg

### Plastskiva

Till Stussbandet medföljer en plastskiva (polyeten) som är avsedd för att underlätta appliceringen.

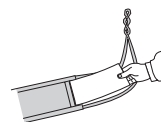

### Tillsyn och skötsel

Kontrollera lyfttillbehöret regelbundet, särskilt efter tvätt. Var särskilt uppmärksam på förslitning och skador på material/tyg, sömmar, band och bandöglor. Använd ej skadade lyfttillbehör. Om något är oklart kontakta tillverkaren eller leverantören.

**Tvättråd:** Se Stussbandets produktetikett. Plastskivan rengöres med tvättsprit.

CE Medicinteknisk klass I produkt

Sabina Stussband uppfyller erforderliga krav enligt Medicintekniska direktivet för klass I produkter (MDD 93/42/EEC). Den uppfyller även alla krav enligt harmoniserad standard EN ISO 10535.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485.

Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

### Design and Quality by Liko in Sweden

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis. Kontakta din Likorepresentant för information, råd och eventuella uppdateringar.



A Hill-Rom Company

[www.liko.se](http://www.liko.se)

Liko AB  
Nedre vägen 100  
SE-975 92 Luleå  
Tel: 0920 - 47 47 00  
Fax: 0920 - 47 47 01  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)

