


Liko® Ståskalsväst, mod. 67 Nalle Ståskalsväst, mod. 67

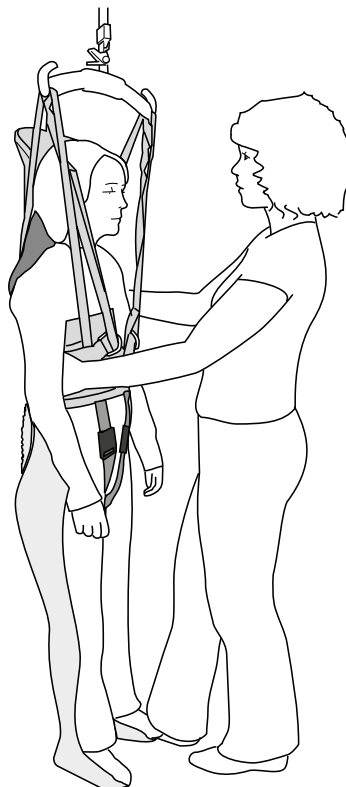

Bruksanvisning



Produktbeskrivning

Bruksanvisningen gäller för Liko Ståskalsväst och Nalle Ståskalsväst, men i texten använder vi genomgående benämningen Liko Ståskalsväst.

Ståskalsvästen är en uppresningsväst som är utvecklad av Liko för att särskilt hjälpa till med uppresningen av en brukare som står med hjälp av ett så kallat "Ståskal". Ståskalsvästen är konstruerad så att den lyfter upp brukaren och Ståskalet tillsammans på ett säkert sätt, oberoende av Ståskalets konstruktion, det vill säga ingen särskild infästning i eller åverkan görs på Ståskalet.

Grenbanden som medföljer kopplas runt grenen och är en extra säkerhet som förhindrar att Ståskalsvästen kan glida upp.

Väl i stående kan brukaren stå i ett ståstöd för ståskal eller i en stårullstol.

Liko Ståskalsväst i barnstorlekarna XS och S till-verkas i ett polyestertyg som är nallemonstrat därav namnet Nalle Ståskalsväst. Storlek M är i grön polyester.

Ståskalsvästen är avsedd att användas med Likos taklyftar eller mobillyft Golvo. I vissa fall, om brukaren inte är för lång, kan en kombination med Uno eller Viking fungera bra. En bedömning skall göras från fall till fall för att säkerställa att lyfthöjden blir tillräcklig.

För att lyfta brukaren till och från Ståskalet används en lämplig lyftsele som väljs efter brukarens förutsättningar och behov av stöd. I den här anvisningen visar vi lyftet med Liko Skalsele som är en tunn och smidig lyftsele som ger stöd för hela kroppen.


Besök vår webbplats www.liko.com för information om nyheter och hela sortimentet.

I dokumentet kallas den som blir lyft för brukaren och den som hjälper till för medhjälparen.

△ är en varningstriangel för moment där särskild aktsamhet bör iakttas.

📖 Läs bruksanvisning för både lyftsele och den lyft som används.

Definitioner





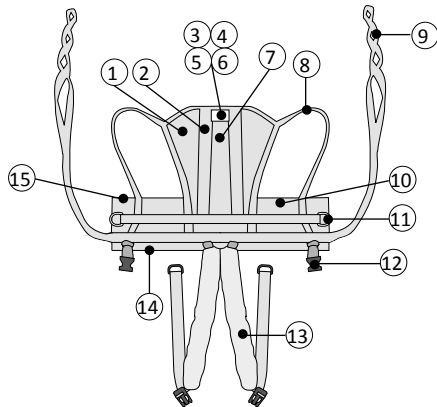



1. Huvudstöd
2. Lattor
3. Produktetikett
4. Serienummer
5. Etikett: Periodisk inspektion
6. Etikett: Individmärkning (Belongs to)
7. Storleksmarkering
8. Avlastningsband
9. Ögleband
10. Väst
11. Metallöglor
12. Främre fäste för Grenband
13. Grenband med polster
14. Nederkant
15. Överkant


△ Säkerhetsföreskrifter!

- Om det behövs en eller flera medhjälpare får bedömas från fall till fall.
- Kontrollera att rätt lyftsele är vald beträffande modell, storlek, material och utförande i förhållande till brukarens behov.
- För säkerhets och hygien hänseende, använd individbundna lyftselar.
- Planera lyftmomentet, före lyft, så att det sker så tryggt och smidigt som möjligt.
- Före lyft, kontrollera att lyfttillbehöret hänger vertikalt och kan röra sig obehindrat.
- Trots att Likos lyftbyglar är försedda med urkrokningsskydd måste särskild uppmärksamhet iakttas: Innan brukaren lyfts från underlaget, men när banden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att banden är rätt påhakade på lyftbygeln.
- Lyft aldrig en brukare högre från underlaget än vad som är nödvändigt för lyftets genomförande.
- Kontrollera att brukaren sitter säkert innan överflyttning sker till annan plats.
- Lämna aldrig en brukare utan tillsyn i en lyftsituation.
- Se till att hjulen på säng, brits etc. är låsta under arbetsmomenten.
- Arbeta alltid ergonomiskt.


Hur man kopplar lyftselen till olika lyftbyglar

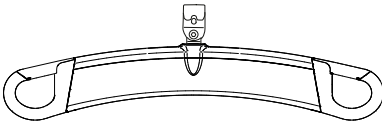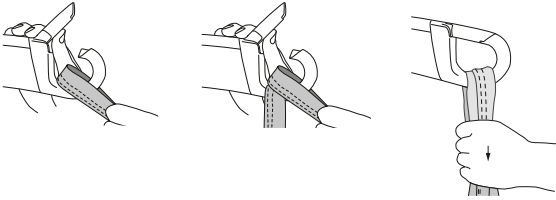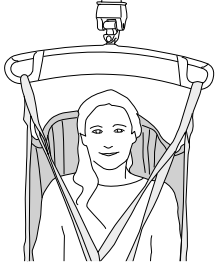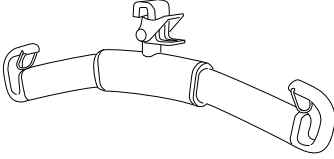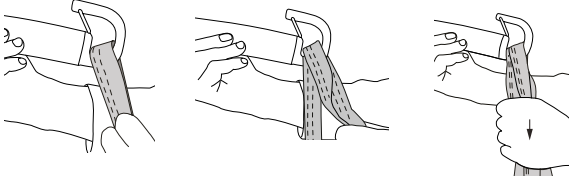Lyftbygel	Lyftögglor till lyftbygelns krokar	Rätt
 <p data-bbox="193 495 359 528">SlingGuard™</p>		
 <p data-bbox="213 786 338 819">Universal</p>		

Fel!

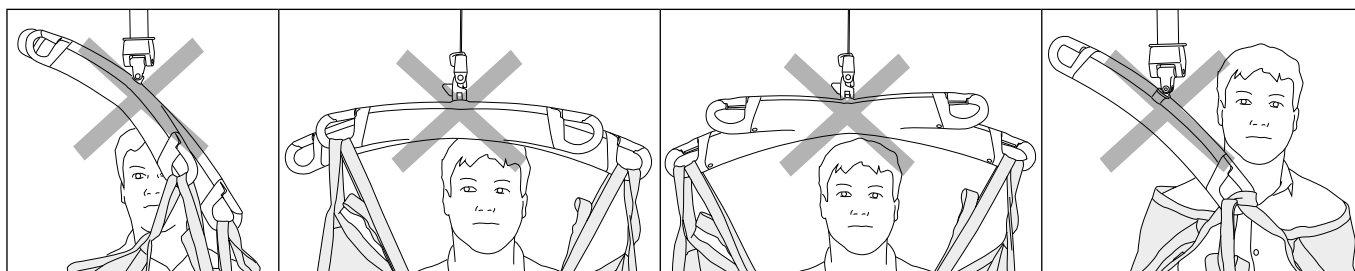


Handhavande

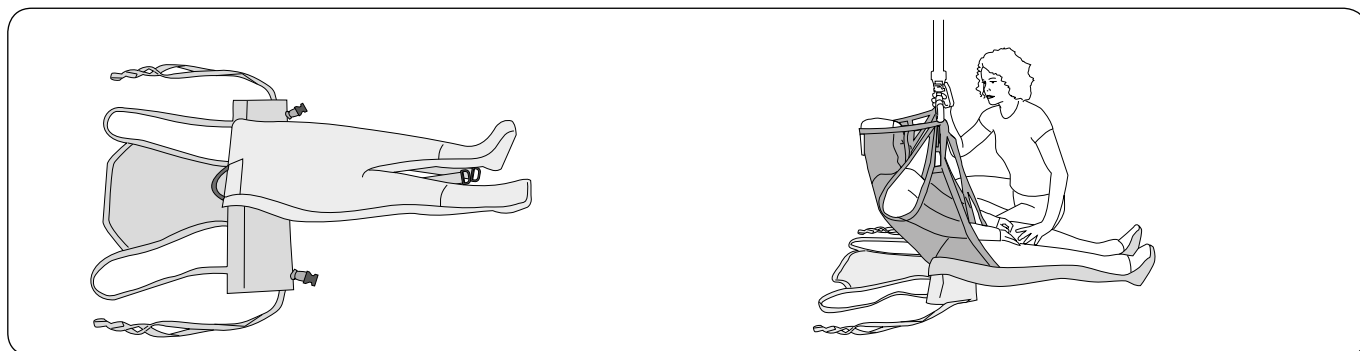


Lägg Ståskalsvästen på golvet och placera ståskalet ovanpå västen så att dess överkant är något högre än Ståskalets överkant. Drag fram Grenbanden så att de är åtkomliga mellan ståskalets bendelar.



Sänk ner brukaren så att ben och fötter hamnar i rätt läge i ståskalet, fortsätt sänka ner försiktigt tills brukaren ligger plant och ge akt på att hon/han får det stöd för huvudet som behövs. Fäst ståskalet runt brukaren enligt gällande anvisningar.

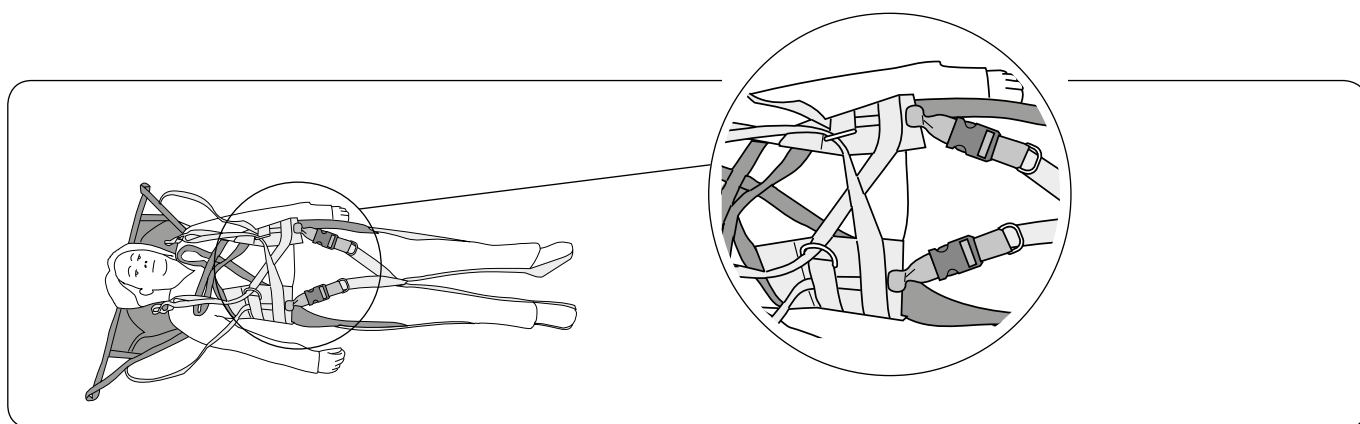

Om det är lämpligt lämnas lyftselen kvar runt brukaren. Benstöden kan rättas till så de inte besvärar. Tag öglebanden och korsa dem, trä dem genom vardera metallögla. Fäst Grenbandens spännen och justera längden på Grenbanden.

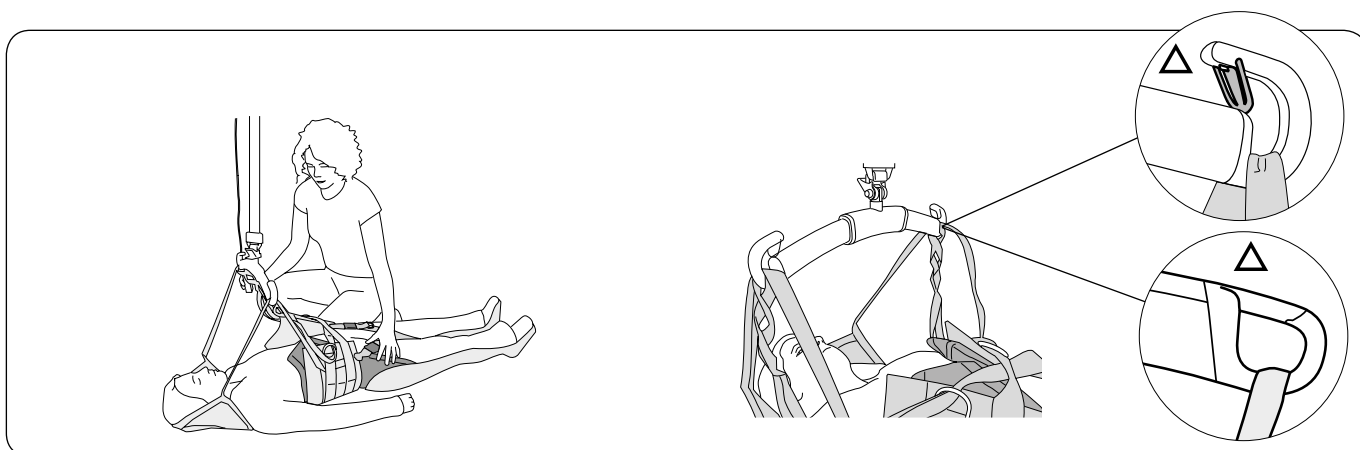

Häng på de valda öglebandens öglor, se utprovningsråden nedan, häng därefter på avlastningsbanden och kör upp lyften tills banden är sträckta. Kontrollera att avlastningsbanden kan löpa fritt ovanpå öglebanden under den fortsatta uppresningen.

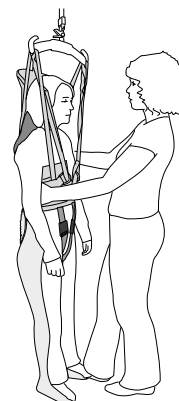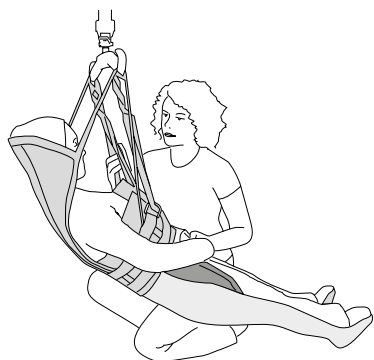


Fortsätt uppresningen, håll i brukarens händer framför kroppen om det behövs. Var uppmärksam på huvudets stöd och att avlastningsbanden löper fritt i lyftbygeln. Justera Grenbandens åtdragning om det behövs, exempelvis om västen tenderar att glida uppåt.

I upprättstående bör brukaren fixeras, exempelvis i ställning eller vid ståbord. Vid behov kopplas Ståskalsvästens öglor bort från lyftbygeln.


Efter avslutad ståträning sänks brukaren och lyfts tillbaka till exempelvis sin rullstol i omvänd ordning.

Utprovningsråd

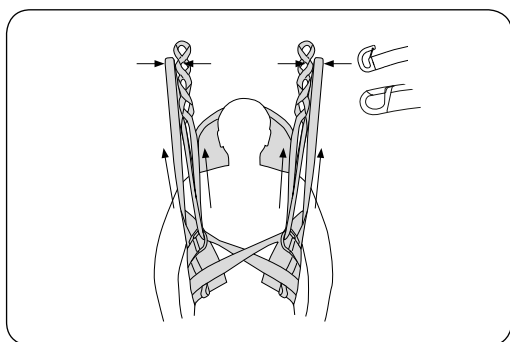

När västen är applicerad runt brukaren och Ståskalet samt öglebanden är trädde enligt anvisningen, ska öglebanden nå upp till avlastningsbandens högsta punkt när alla band är sträckta.

Välj den ögla som motsvarar avlastningsbandets längd. Om tveksamheter råder bör man välja den ögla vars övre del är närmast under avlastningsbandets högsta punkt.

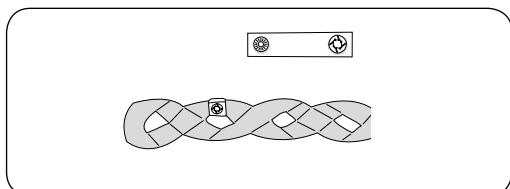

Ögleclips


Ett praktiskt tillbehör för att märka ut de öglor som är utprovade för en viss person. Det underlättar för medhjälparna att välja rätt ögla att kroka på lyftbygeln.

Tillbehör

Polstringshylsa

Art. nr. 3666021

Som tillbehör finns Polstringshylsor att sätta på de främre avlastningsbanden i fall brukaren upplever att de trycker mot kroppen.

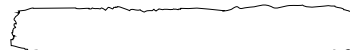

Översikt Liko® Ståskalsväst, mod. 67

Artikel	Art. nr.	Storlek	Material	Personvikt ¹	Maxlast ²
Nalle Ståskalsväst	3567812	XXS Extra Extra Small	Nallemönstrad polyester	< 15 kg	200 kg
Nalle Ståskalsväst	3567813	XS Extra Small	Nallemönstrad polyester	10-20 kg	200 kg
Nalle Ståskalsväst	3567814	S Small	Nallemönstrad polyester	20-40 kg	200 kg
Liko Ståskalsväst	3567115	M Medium	Polyester	40-60 kg	200 kg
Liko Ståskalsväst	3567116	L Large	Polyester	60-80 kg	200 kg

¹ Den angivna personvikten är endast vägledning – avvikelser kan förekomma.

² För bibehållen maxlast krävs lyft/tillbehör avsedda för samma belastning eller mer.

Vid val av storlek får man ta hänsyn till att ståskalet behöver utrymme innanför västen.

Tvättråd: Se lyftselsens produktetikett samt bifogad bilaga "Skötselråd för Likos lyftselar".

Förväntad livslängd

Produkten har en förväntad livslängd på 1-5 år vid normal användning. Livslängden varierar beroende på material, användningsfrekvens, tvättförfarande och belastning.

Periodisk inspektion

En periodisk inspektion av produkten skall utföras minst var 6:e månad. Tätare inspektioner kan krävas om produkten används eller tvättas oftare än normalt. Se Likos protokoll "Periodisk inspektion Liko textila produkter".

Rekommenderade kombinationer

Rekommenderade kombinationer med Liko Ståskalsväst och Likos lyftbyglar:	Minitbygel 220	Lyftbygel 350 ³	Lyftbygel 450 ¹	Lyftbygel 600 ⁴	Bred 670	Twinbygel 670 ²
Nalle Ståskalsväst, XXS	1	1	1	3	3	3
Nalle Ståskalsväst, XS	1	1	1	3	3	3
Nalle Ståskalsväst, S	1	1	1	3	3	3
Ståskalsväst, M	2	1	1	3	3	3
Ståskalsväst, L	2	1	1	3	2	3

Förklaring:

- 1 Rekommenderas
- 2 Kan gå
- 3 Avrådes
- 4 Olämpligt

¹ Lyftbygel 450 avser Universalbygel 450 artikelnr. 3156075, 3156085 och 3156095, Lyftbygel Standard 450 artikelnr. 3156001, 3156003, 3156007 och 3156016 samt SlingGuard 450 artikelnr. 3308020 och 3308520.

² Twinbygel 670 avser Universalbygel 670 Twin artikelnr. 3156077 och 3156087 samt SlingGuard 670 Twin artikelnr. 3308040 och 3308540.


³ Lyftbygel 350 avser Universalbygel 350 artikelnr. 3156074, 3156084 och 3156094 samt SlingGuard 350 artikelnr. 3308010 och 3308510.

⁴ Lyftbygel 600 avser Universalbygel 600 artikelnr. 3156076 och 3156086 samt SlingGuard 600 artikelnr. 3308030 och 3308530.

Kombinationer med Liko Ståskalsväst och Fyrpunktsbygel, Kryssbygel 450/670 eller Sidobyglar är olämpliga.

Övriga kombinationer

Andra kombinationer av tillbehör/produkter än de av Liko rekommenderade kan medföra risk för brukarens säkerhet.

 Medicinteknisk klass I produkt

Liko Ståskalsväst uppfyller alla krav enligt harmoniserad standard ISO 10535:2006.

Kvalitetsledningssystemet för både tillverkning och utveckling är certifierat enligt ISO9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO13485. Ledningssystemet är även miljöcertifierat enligt ISO14001.

PATENT www.hill-rom.com/patents

Kan omfattas av ett eller flera patent. Se ovanstående internetadress.

Hill-Rom bolagen är innehavare av patent och patentansökningar inom EU, US och övriga länder.

Likos produkter utvecklas ständigt varför vi förbehåller oss rätten till ändringar i produkter utan föregående notis.

Kontakta din Hill-Rom representant för information, råd och eventuella uppdateringar.

Viktigt!

Lyft och överflyttning av en person medför alltid en viss risk, studera därför noga bruksanvisning från såväl lyft som lyfttillbehör. Det är viktigt att helt och fullt förstå innehållet i bruksanvisningen, endast den personal som är informerad bör använda utrustningen.

Förvissa dig om att lyfttillbehöret passar till den lyft som används. Iakttag försiktighet och omsorg vid användandet.

Som medhjälpare är du alltid ansvarig för brukarens säkerhet. Du måste vara informerad om brukarens möjligheter att klara lyftsituationen.

Kontrollera lyftselen regelbundet, särskilt efter tvätt. Var särskilt uppmärksam på förslitning och skador på sömmar, tyg, band och bandöglor. Använd ej skadade lyfttillbehör. Om något är oklart kontakta tillverkaren eller leverantören.



www.hill-rom.com | www.liko.com