



Den stadiga sockelhöjaren

Sockelhöjarens skal är tillverkat av natureloxerad aluminium. På insidan av skalet finns plastflikar av olika längd placerade parvis. Trycket från flikarna gör att sockeln oavsett tjocklek fäster vid sockelhöjaren. Trycket är dock inte så hårt att den skadar möbeln och inga märken finns på möbeln när sockelhöjaren tas bort. Den understa biten har plastlister som skonar golvet.

Viktiga egenskaper

- Lätt att sätta fast
- Monteras utan verktyg
- Skadar inte möbeln
- Sitter kvar när möbeln lyfts

Rätt höjd utan besvär.


Victor passar socklar 2,5-7,5 cm tjocka. Med grundsatsen höjer Victor sockeln i intervallen 4-8-12 cm. Med kompletteringssatsen kan höjden ökas ytterligare 4 cm.

Victor™ monteras eller tas isär utan verktyg**Montering:**

1. Placera förhöjningsbiten i den fasade skåran
2. Tryck ihop

Demontering:

1. Tryck
2. Lyft isär

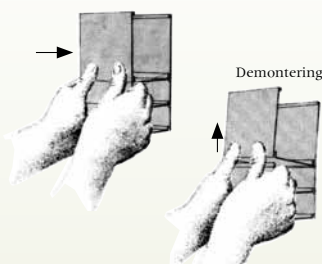

Max belastning per ben:	120 kg
Förhöjer :	4-12 cm
Grundsats:	Består av basdel med 3 st förhöjningsbitar à 4 cm
Förpackas:	Förpackas 4 st i varje kartong, 5 kartonger i varje storförpackning.
Artikelnummer:	10130 Alu/grå
Kompletteringssats:	4 bitar à 4 cm
Artikelnummer:	10140 Alu/grå

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och dess motsvarighet för medicintekniska företag, ISO 13485. Liko är miljöcertifierade enligt ISO 14001.



Hill-Rom är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Hill-Rom Services Inc. Liko är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB. Victor är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Liko R&D AB.

Hill-Rom®

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Tillverkare:
Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå,
Sweden
Tel 0920-47 47 00
Fax 0920-47 47 01
info@liko.se

To find your local Liko representative,
please visit www.liko.com or call
+46 (0)920 47 47 00

www.hill-rom.com
www.liko.com

Hill-Rom® förbehåller sig rätten att, utan föregående meddelande, göra ändringar i design, specifikationer och modeller. Den enda garanti som Hill-Rom® ger är den uttryckliga, skriftliga garantin som erbjuds vid försäljning eller hyra av deras produkter.

© 2010 Hill-Rom®, SARL, ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES