



Viking S / Viking XS

Användaranvisning

Svensk

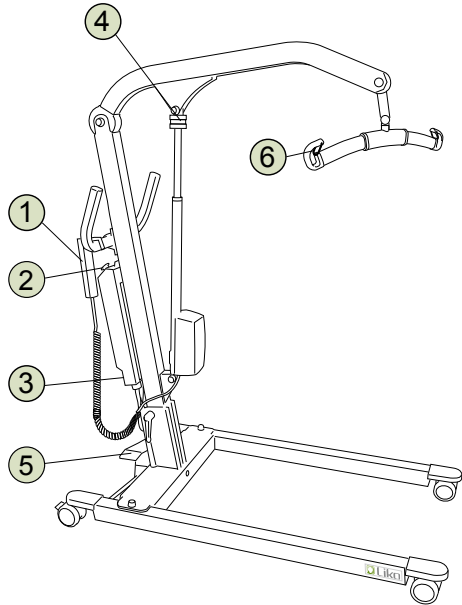


1 Handkontroll

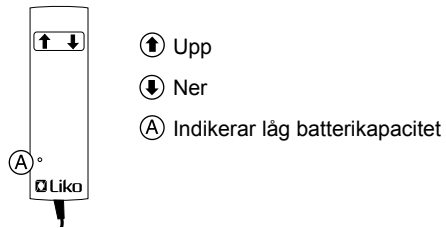

2 Nödstopp


Aktivering:

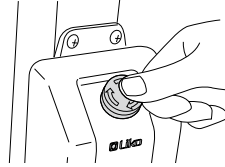


Aterställning:




3 Elektrisk nödsänkning

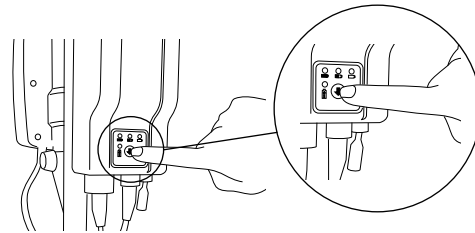


4 Mekanisk nödsänkning

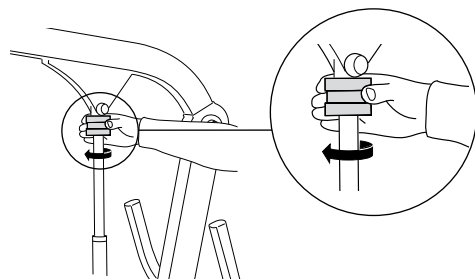


5 Breddning av underrede

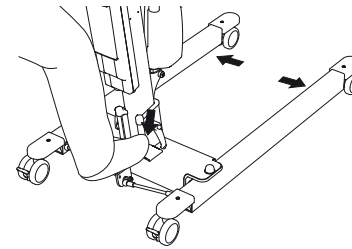

6 Urkrokningskydd

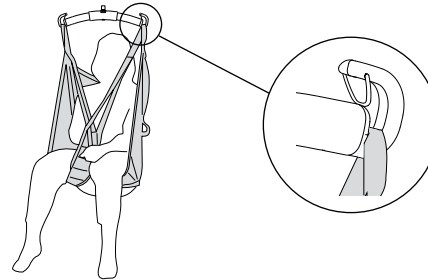


Laddning av batterier

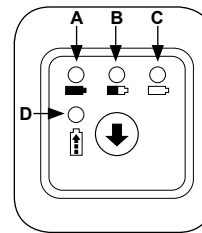

Batterikapacitet

- A Grön: minst 50 %
- B Gul: 25-50 %
- C Gul: 0-25 %
- D Laddning pågår

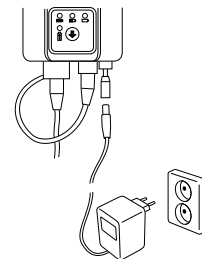

- Ladda lyften regelbundet efter användning.
- Lyften fungerar inte under laddning.
- Nödstoppen ska ej vara intryckt under laddning.

Ergonomi

- Inga manuella lyft – låt lyften göra jobbet.
- Stressa inte – arbeta lugnt och metodiskt.
- Skona ryggen – arbeta i gångstående med rak rygg.
- Använd sängens höj- och sänkfunktioner.
- Minska hävarmarna – arbeta nära.

Rengöring

Vid behov, rengör lyften med mildt rengöringsmedel eller tvättsprit.

Enkel felsökning

Kontrollera att:

- Nödstoppen inte är intryckt.
- Batteriet är laddat.
- Handkontrollen är rätt ansluten.

Övriga användaranvisningar

Användaranvisningar för Likos lyftar och lyftselar finns att ladda ner från www.liko.se.

© Copyright Liko AB



Säkerhetsföreskrifter

- Läs bruksanvisning för både patientlyft och lyfttillbehör före användning.
- Planera lyftmomentet noggrant.
- Innan brukaren lyfts från underlaget, men när lyftbanden är ordentligt sträckta, är det viktigt att kontrollera att öglorna är rätt påhakade på lyftbygeln.
- Se till att personal som använder lyften är informerad om hur den ska handhas.
- **Maxlast 160 kg.**

För bibehållen maxlast krävs tillbehör avsedda för samma belastning eller mer.

VIKTIGT!

Denna användaranvisning ersätter inte lyftens bruksanvisning, vilken kan laddas ner från www.liko.se.